

PL Instrukcja używania

# OTTILAN

## AKUSTIK

### SERUM OLEJOWE DO USZU



**Delikatnie usuwa woskowinę**

#### ■ Zmniejsza ryzyko zapalenia ucha


**Ottilan Akustik serum olejowe do uszu** to wyrób medyczny, który delikatnie rozpuszcza i usuwa nadmiar woskowiny usznej. Dzięki unikalnemu połączeniu MEDICAL CLEAN COMPLEX (naturalna oliwa z oliwek, ekstrakt z granatu i rozmarynu) ogranicza nadmierną produkcję woskowiny i zapobiega powstawaniu czopów woskowinowych, zmniejszając ryzyko zapalenia ucha. Ponadto pipeta umożliwia łatwą i delikatną aplikację nawet u dzieci powyżej 3. miesiąca życia.

#### WSKAZANIA:

- usuwa nadmiar woskowiny i zapobiega jej gromadzeniu się,
- zapobiega tworzeniu się czopa woskowinowego, ewentualnie ułatwia jego usuwanie,
- zmniejsza ryzyko zapalenia ucha, stymuluje naturalne mechanizmy przeciwzapalne,
- nadaje się do regularnej higieny uszu,
- polecany osobom noszącym aparaty słuchowe lub słuchawki ze względu na skłonność do gromadzenia się czopów woskowinowych,
- zapobiega zatrzymywaniu wody w uchu podczas kąpieli lub uprawiania sportów wodnych.

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję używania.

**SPOSÓB UŻYCIA:** Przed użyciem należy ogrzać butelkę, trzymając ją w dłoni przez około 1 minutę. Przechylić głowę, aby zaaplikowane krople mogły swobodnie spłynąć do kanału słuchowego. Następnie za pomocą pipety nanieść zalecaną liczbę kropli do kanału słuchowego. Pozostawić na co najmniej 5 minut. Zaleca się, aby podczas zabiegu głowa była lekko pochylona. Następnie wyprostować głowę i pozwolić, aby pozostałości wypłynęły z ucha i dokładnie wytrzeć zewnętrzną część kanału słuchowego.

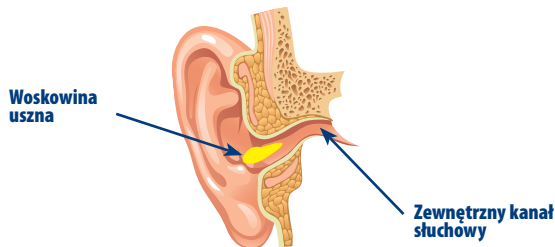

**DAWKOWANIE:** W celu zapobiegania nadmiernemu tworzeniu się woskowiny u dzieci do 12. roku życia i niemowląt powyżej 3. miesiąca życia należy aplikować: 1-2 krople do każdego ucha 1-2 razy w tygodniu, maksymalnie 2 krople 3 razy w tygodniu.

W celu zapobiegania nadmiernemu tworzeniu się woskowiny u dorosłych i dzieci od 12. roku życia należy aplikować: 2-3 krople do każdego ucha 1-2 razy w tygodniu, maksymalnie 4 krople 3 razy w tygodniu.

W przypadku tworzenia się czopa woskowinowego należy aplikować 3-4 krople 3-5 razy dziennie przez 4-5 dni, aż czop woskowinowy i pozostałości woskowiny rozpuszczą się i zostaną usunięte, maksymalnie 5 kropli 5 razy dziennie przez 5 dni.

W celu zapobiegania zatrzymywaniu wody w uchu u dzieci do 12. roku życia i niemowląt powyżej 3. miesiąca życia, należy aplikować 1-2 krople do każdego ucha przed kąpielą lub pływaniem, po kąpieli ostrożnie wytrzeć uszy.

W celu zapobiegania zatrzymywaniu się wody w uchu pływaków w wieku powyżej 12 lat i starszych, należy aplikować 2-3 krople do każdego ucha przed kąpielą lub pływaniem, a po kąpieli ostrożnie wytrzeć uszy.

**OSTRZEŻENIE:** Produkt przeznaczony do zastosowania zewnętrznego. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Nie wkładać aplikatora zbyt głęboko do zewnętrznego przewodu słuchowego. W przypadku dzieci i niemowląt produkt powinien aplikować osoba dorosła. Po każdym zastosowaniu zaleca się wypłukanie szklanej pipety pod ciepłą bieżącą wodą i delikatne wysuszenie. Nie stosować do oczu, nosa ani ust. Nie przekraczać zalecanej dawki. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie nadaje się dla niemowląt poniżej 3. miesiąca. Jest odpowiedni dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Ze względów higienicznych zalecamy używanie produktu tylko przez jedną osobę. Stosować krótkoterminowo, maksymalnie do 30 dni.

**MECHANIZM DZIAŁANIA:** Serum olejowe rozpuszcza i ogranicza tworzenie się czopa woskowinowego, stymuluje fizjologiczne mechanizmy przeciwzapalne i ogranicza nadmierną produkcję woskowiny.

**PRZECIWSKAZANIA:** Nie stosować w przypadku bólu ucha, perforacji błony bębenkowej, w przewlekłych stanach zapalnych ucha środkowego i przewodu słuchowego. Jeśli woskowina uszna rozpuści się i problemy ze słuchem nie ustąpią po 5 dniach stosowania, należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować do kanału słuchowego jednocześnie z innym produktem do stosowania miejscowego.

**PRZECHOWYWANIE:** Przechowywać w temperaturze pokojowej, w ciemnym i suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:** Opakowanie zawiera 20 ml roztworu w butelce z nakrętką z pipetą oraz instrukcję używania.

**Skład:** *Olea Europaea* Fruit Oil, *Helianthus Annus* Seed Oil, Glyceryl Caprylate, *Punica Granatum* Seed Extract, *Rosmarinus Officinalis* Leaf Extract, Glyceryl Undecylenate.

Wytwórca: Simply You Pharmaceuticals a.s.,

Roháčova 188/37, 130 00 Praga 3, Czechy.

Wyprodukowano w Czechach.

**Dystrybutor:** Simply You Novascon Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa.

Simply You  
NOVASCON

Wszelkie poważne zdarzenia niepożądane występujące w związku z danym produktem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym producent i/lub pacjent ma swoją siedzibę/miejsce zamieszkania.



OZNACZENIE SYMBOLI NA OPAKOWANIU:

MD	i	Użyć do daty	LOT	Temperatura	Światło słoneczne	Wytwórca/Producent	Puste opakowanie wyrzucić do kosza
Medical device/wyrób medyczny	Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją używania		Numer serii produkcyjnej	Dopuszczalna temperatura	Trzymać z dala od światła słonecznego		

Data ostatniej aktualizacji: 06/08/2023